

Opalescence

● ● ● go™
Tooth Whitening

新世代のホームホワイトニング材
オパールエッセンスGo

ついに日本上陸

カスタムトレイ
作製不要

go

Opalescence
● ● ● go™
Tooth Whitening

Opalescence
● ● ● go™
Tooth Whitening



詳しい製品情報は
こちらから



オパールエッセンス Go は、

カスタムトレイ作製不要という簡便さを実現させたホームホワイトニングシステムです。歯列に合わせて形が変形する**ウルトラフィットトレイ**を使用しています。予めホワイトニングジェルが充填されたトレイにより場所を選ばず、好きな時にホワイトニングを行うことができます。

- ・口腔診断後、すぐに処方できるためケアタイム削減
- ・過酸化水素 6%
- ・使用時間は 1 日 90 分（連続 10 日間使用可能）

単回使用のトレイには予めジェルが充填されているので、下記工程が不要です。

不要 トレイ作製
ジェルの注入
ホワイトニング後のトレイの洗浄

患者 1 名分
10 日間の
ホーム
ホワイトニング
キット



4634-JP
オパールエッセンスGo
パシエントキット
(過酸化水素6%)
トレイ(上下顎)×10個
患者様用取扱説明書×1枚
通常価格:8,500円
※再使用禁止
※外箱サイズ:19.0cm×10.8cm×8.3cm

販売名: オパールエッセンス Go / 一般名: 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 / 高度管理医療機器 / 承認番号: 30300B2I00024000 / 冷蔵保存

使用方法



1. パッケージから製品を取り出します。
「U」…上顎用ホワイトニングトレイ
「L」…下顎用ホワイトニングトレイ



2. 上顎用トレイを歯面に装着します。



3. 軽く吸い込むようにして、トレイを歯面に密着させます。



4. 内側の白いトレイを歯に残したまま、外側の色付きのトレイを取り外します。下顎用のトレイに対しても同様に装着します。



5. 装着後、ホワイトニングトレイを取り外し、破棄します。歯を磨き余分なジェルを除去します。

With
UltraFit
Tray

口腔内装着後、体温によって歯列に合わせて変形する**ウルトラフィットトレイ**は多くの症例に対応します。



ONLINE SEMINAR

Opalescence
go
Tooth Whitening
Online Whitening Class
ホワイトニング教室

毎週 2 回開催 (月曜・金曜)

第 1 回 **11 月 15 日 (月) 13:00 ~**

第 2 回 **11 月 19 日 (金) 13:00 ~**

※その他の日程は、下記 QR コード (申し込みフォーム) よりご確認頂けます。

開催場所: オンライン Zoom ミーティング

定 員: 100 名

受 講 料: 無料

時 間: 13:00 ~ (30 分程度)

申込方法: 下記 QR コードよりお申込みください

お申し込みは
右の
QR コードから！



本セミナーはウェブ会議システム Zoom を使用して行います。ご使用端末 (スマートフォンやタブレット端末) によっては Zoom アプリダウンロードが必要です。
※オンデマンド配信の予定はありません。

内容

オパールエッセンス Go の特徴・製品概要 / 従来品 (オパールエッセンス 10%) との違い / ホワイトニングメニューについて / 質疑応答

